

FENIX 4D PRO

**БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ:**

- ★ 8 СЛОЕВ
- ★ ВЕРХНИЙ СЛОЙ
600 МРА
- ★ ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
В ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ ВИТА



ЦИРКОНИЙ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



57% - 600 МРА
56% - 700 МРА
54% - 800 МРА
52% - 900 МРА
50% - 980 МРА
48% - 1050 МРА
46% - 1150 МРА
45% - 1250 МРА

ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ



Диски 4D Pro подходят как для одиночных реставраций, так и для мостов любой протяженности. Отличная прозрачность у режущего края, одновременно с opakовостью у шейки, позволяет создавать прочные и эстетичные работы. 8 слоев с незаметным переходом обеспечивают равномерный градиент цвета и прозрачности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕСТАВРАЦИЙ



ТИП РЕСТАВРАЦИИ	ФРОНТАЛЬНЫЕ	БОКОВЫЕ
ОДИНОЧНЫЕ КОРОНКИ	0.6 MM	0.8 MM
МОСТЫ 3 ЕД.	0.8 MM	1.0 MM
МОСТЫ БОЛЕЕ 4 ЕД.	1.0 MM	1.2 MM

Обратите внимание – если после синтеризации цирконий получается светлее, чем должен быть по шкале VITA, это означает, что ваша печь завывает температуру. Понизьте максимальную температуру с 1500 до 1480 и снова сравните цвет. Если же цирконий получается темнее чем нужно, то, наоборот, печь занижает температуру. Повысьте температуру обжига на 20 градусов. Дальнейшие корректировки – с шагом 10 градусов до получения точного соответствия со шкалой VITA.

4D PRO



FENIXDENT.RU
SALES@FENIXDENT.RU
+7 (993) 753-73-57

● ПРОГРАММА ОБЖИГА 4D PRO, ОТ 4 ДО 7 ЕДИНИЦ

ЭТАП	СТАРТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	НАГРЕВ/ ОХЛАЖДЕНИЕ	КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВРЕМЯ НА ЭТАП
1	20 °C	5 °C/МИН	900 °C	180 МИН
2	900 °C	ВЫДЕРЖКА	900 °C	30 МИН
3	900 °C	4 °C/МИН	1500 °C	150 МИН
4	1500 °C	ВЫДЕРЖКА	1500 °C	120 МИН
5	1500 °C	8 °C/МИН	300 °C	150 МИН

● ПРОГРАММА ОБЖИГА 4D PRO, ОТ 7 ЕДИНИЦ

ЭТАП	СТАРТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	НАГРЕВ/ ОХЛАЖДЕНИЕ	КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВРЕМЯ НА ЭТАП
1	20 °C	4 °C/МИН	900 °C	225 МИН
2	900 °C	ВЫДЕРЖКА	900 °C	30 МИН
3	900 °C	3 °C/МИН	1500 °C	200 МИН
4	1500 °C	ВЫДЕРЖКА	1500 °C	120 МИН
5	1500 °C	4 °C/МИН	900 °C	150 МИН
6	900 °C	8 °C/МИН	300 °C	75 МИН

4D PRO




FENIXDENT.RU
SALES@FENIXDENT.RU
+7 (993) 753-73-57

● ПРОГРАММА ОБЖИГА 4D PRO, ДО 4 ЕДИНИЦ

ЭТАП	СТАРТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	НАГРЕВ/ ОХЛАЖДЕНИЕ	КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВРЕМЯ НА ЭТАП
1	20 °C	6 °C/МИН	900 °C	150 МИН
2	900 °C	ВЫДЕРЖКА	900 °C	30 МИН
3	900 °C	5 °C/МИН	1500 °C	120 МИН
4	1500 °C	ВЫДЕРЖКА	1500 °C	120 МИН
5	1500 °C	10 °C/МИН	300 °C	120 МИН

● ГРАФИК ПРОГРАММЫ ОБЖИГА

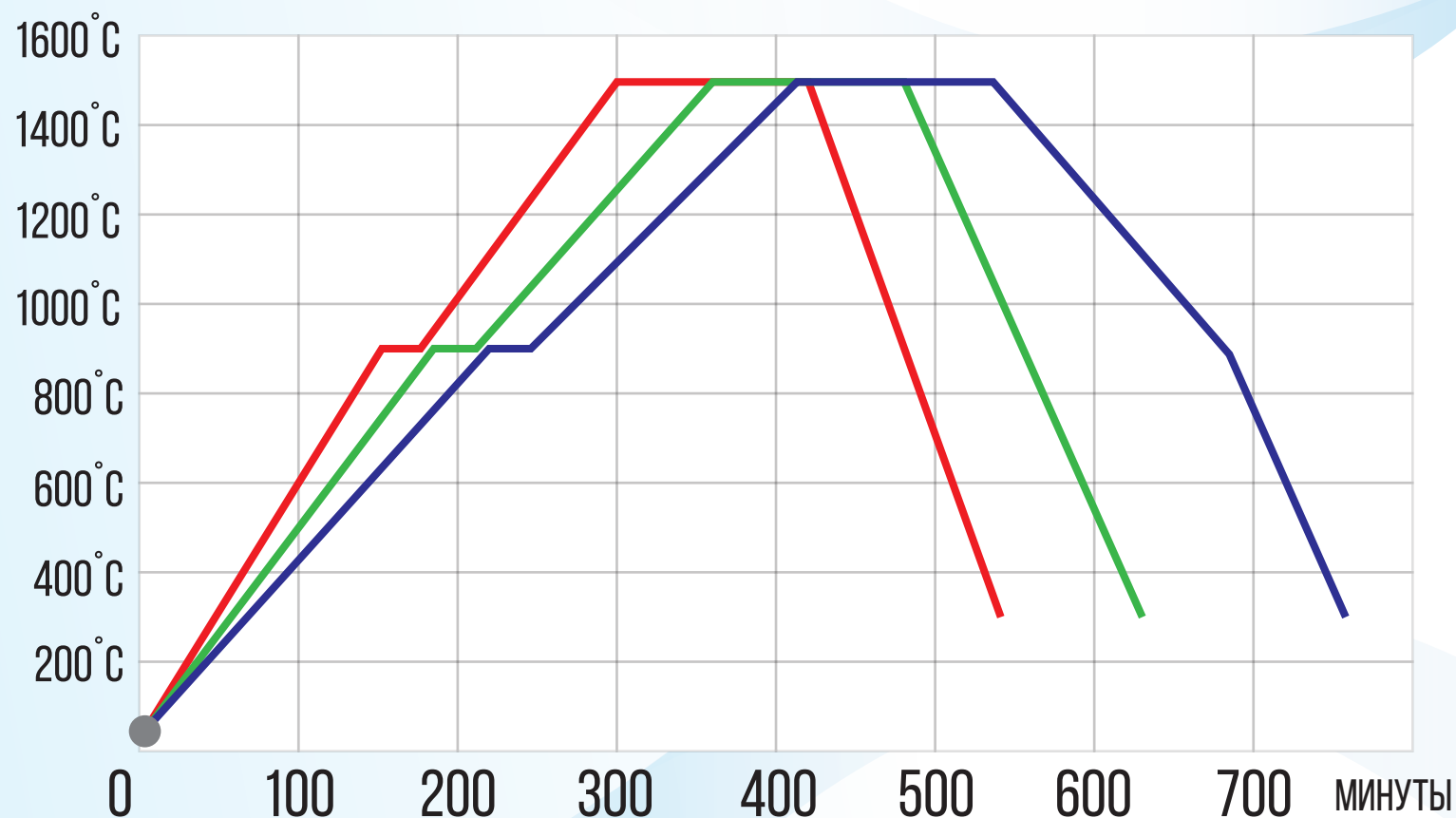

FENIX DENT



FENIXDENT.RU

SALES@FENIXDENT.RU

+7 (993) 753-73-57